

Indicador Químico tipo V



O indicador químico tipo V da Higie é um produto de qualidade desenvolvido pela HigieTag e avaliado por laboratório europeu certificador de produtos médicos, atendendo a normativa ISO 11140-1/2019.

Parâmetros

O indicador químico de esterilização tipo V para vapor é sensível a todos os parâmetros do processo de esterilização, monitorando o tempo, temperatura e pressão apresentando alteração de cor conforme o tempo de processo e indicando quando o binômio tempo/temperatura foi **corretamente** aplicado, mudando a cor rosa do indicador para a cor **cinza** conforme **gabarito de cor**.

Os ciclos de esterilização a vapor realizados a 121°C por 17 minutos e a 134°C por 4 minutos alteram a cor rosa do indicador para a cor cinza. A alteração da cor rosa para a cor marrom ou mais clara indica que não houve exposição do material à temperatura adequada pelo tempo necessário para esterilizar o material, sendo necessário verificar excesso de carga na embalagem ou a manutenção na autoclave.


Atende a ABNT ISO 11140-1/2019.

Tempo de exposição


121°C	127°C	134°C
17 minutos	12 minutos	4 minutos

Gabarito de cor


NÃO PROCESSADO

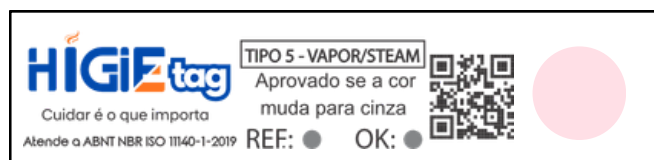

NÃO APROVADO

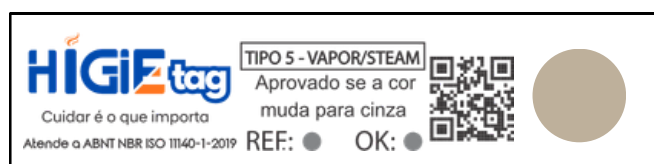

APROVADO

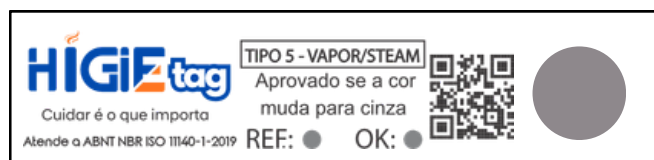

VISITE O SITE

CONTATE-NOS

VENDAS



(18) 99800-2525

SAC

HIGIETAG@GMAIL.COM

SITE

HIGIETAG.COM

HIGIEtag

Cuidar é o que importa.

Sobre o produto

Fita indicadora de esterilização | Tipo V

O indicador Higie é elaborado com materiais não solúveis em água, não contém chumbo, solventes orgânicos ou materiais tóxicos. Os indicadores tipo V para vapor não alteram a cor quando expostas ao calor seco, sendo isento de registro Anvisa conforme RDC 185/2001.



OBSERVAÇÃO:

NO ENVELOPE COLOCAR O INDICADOR VOLTADO PARA O LADO DO PAPEL



“

Cuidar é o que importa.

Validade e armazenamento

O armazenamento das fitas após aberta a embalagem deve ser em condições ambientes adequadas e de preferência dentro da embalagem original livre de lugares úmidos e quentes para evitar avarias nas fitas, no intervalo de 20 a 30°C.

A validade do indicador é de 2 anos a partir da data de fabricação. Não é recomendado cortar a fita. Após o uso a fita aprovada pode ser adesivada nos formulários do paciente sem risco de alteração da cor cinza por até seis meses.



VISITE O SITE

CONTATE-NOS

VENDAS



(18) 99800-2525

SAC

HIGIETAG@GMAIL.COM

SITE

HIGIETAG.COM

HIGIEtag

Cuidar é o que importa.