

Sobre o produto


No pacote desafio encontra-se uma ficha de avaliação que deve ser preenchida conforme a alteração da cor do indicador químico, que deve mudar de rosa para cinza. Se a cor permanecer marrom, salmão ou rosa, a esterilização não foi bem-sucedida e o resultado deve ser assinalado como rejeitado. Para o indicador biológico, após a incubação, a mudança de roxo para amarelo indica germinação e crescimento de esporos, resultando em rejeição.

**Atende a GPSD (2001/95/EC) e
ABNT ISO 11140-1/2019**


121°C	127°C	134°C
17 minutos	12 minutos	4 minutos

A carga que está sendo esterilizada só pode ser liberada quando o indicador integrador tipo 5 presente no PCD da marca HigieTag estiver na tonalidade cinza (conforme o padrão de cor abaixo). O IB, conforme a ABNT/ISO 11140-1, pode apresentar menor margem de segurança que o IQ integrador, sendo o IQ integrador HigieTag tipo V adequado para a liberação da carga, em concordância com a Resolução RDC Anvisa nº 15/2012, que estabelece o uso obrigatório de um pacote desafio contendo um indicador químico integrador para a liberação de cada carga esterilizada.


NÃO PROCESSADO

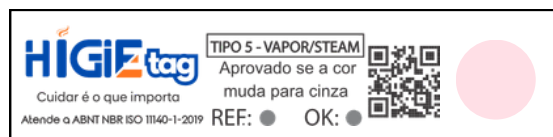

NÃO APROVADO

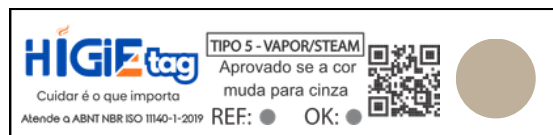

APROVADO

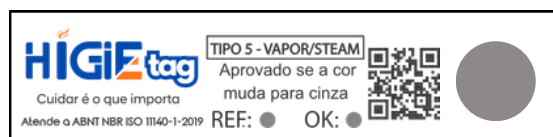

CONTATE-NOS

VENDAS

SAC

(18) 99800-2525

HIGIETAG@GMAIL.COM

SITE

HIGIETAG.COM



Cuidar é o que importa.

Instrução de uso

O pacote teste desafio da HigieTag já está pronto para uso. Não abra a embalagem, exceto se ela contiver o IB Controle. Nessa situação, abra a aba indicada no fundo da caixa, na parte picotada marcada como Controle, e retire o IB Controle.

NÃO ABRA A CAIXA

Coloque a caixa no local de maior dificuldade de esterilização, como porta ou dreno, com o rótulo voltado para cima. O PCD apresenta no rótulo um indicador que deve mudar da cor rosa para cinza quando for processado. Realize o ciclo de esterilização e secagem definido e, após o resfriamento, abra a embalagem e procure os indicadores e a folha de resultado. Observe o resultado do IQ, que pode ser visto imediatamente como aprovado ou rejeitado. O indicador é adesivo e deve ser colado na folha de resposta, que também é adesiva. O IB é autocontido; a ampola de vidro deve ser cuidadosamente rompida, sem danificar o tubo plástico, e depois incubada conforme o tempo e processo adequados: 24 horas em incubadora de aquecimento ou, para IB rápidos, em incubadora de fluorescência pelo tempo indicado. Registre os resultados na folha de resposta, que é adesiva e pode ser fixada nos cadernos de esterilização. Após o uso, o PCD deve ser descartado.

HIGIEtag PCD TEST

Cuidar é o que importa.



Resultados

O IQ será aprovado quando a cor rosa mudar para cinza, e o IB será considerado aprovado quando não houver crescimento de microrganismos após a incubação (sem mudança de cor do indicador após 24 horas e/ou fluorescência negativa). Em caso de falha no processo de esterilização, o IQ não atingirá a cor cinza, e o IB poderá apresentar resultado negativo devido ao maior limite de segurança dos Indicadores Químicos - IQ (ISO 11140-1). O PCD é reprovado quando o IQ não muda para cinza, e nessa situação é preciso investigar a causa (excesso de carga, falha no equipamento ou cancelamento inesperado do ciclo).

Composição:

- caixa de papel,
- suportes de papel,
- tira indicadora química de esterilização tipo V, podendo conter indicador biológico autocontido em ampola de vidro,
- cartão de resposta.



Dúvidas: em caso de dúvidas consultar o serviço de atendimento ao consumidor pelo e-mail: higietag@gmail.com



VISITE O SITE

CONTATE-NOS

VENDAS



(18) 99800-2525

SAC

HIGIETAG@GMAIL.COM

SITE

HIGIETAG.COM

HIGIEtag

Cuidar é o que importa.